



Název výrobku: **Gardova půda**

Kód výrobku: **98270**

Zkratka výrobku: **GA**

Návod k použití

Použití:

Gardova půda se používá k získání 24 hodinové kultury salmonel pro sklíčkovou aglutinaci.

Barva media:

nažlutlá

Teoretické složení (g/l destilované vody):

Kaseinový hydrolyzát 10,0

Masový extrakt 10,0

Chlorid sodný 5,0

Agar 5,0

Výsledné pH 7,5±0,2

Uchování:

Médium uchovávat při teplotě od 4°C do 8°C.

Datum expirace a číslo šarže jsou uvedeny na obalu.

Pracovní postup

Inokulace:

Inokulujte standardním způsobem.

Inkubace:

Inkubujte po dobu 18-24 hodin při 37 °C, v aerobní atmosféře

Kontrola kvality:

Salmonella enteritidis CCM 4420

aglutinace pozitivní

Balení výrobku:


Misky balíme do perforované folie v minimálním množství 10 kusů.

Datum účinnosti: 1.1.2011

Vydání: 2

Výtisk: 1

Strana: 1 (celkem 1)

 **V I A M A R**
International s.r.o.
U Habrovky 247/11
14000 Praha 4, ČR

