

Návod k použití

Název Šulova půda
Kód 98063
Zkratka Z-SU
Základní UDI-DI 85941999298063BZ

Použití Šulova půda je určena k pěstování mykobakterií.

Obecné informace

Forma produktu	tekuté médium ve zkumavce Ø 17 x 130 mm; V=16,5ml
Plnicí objem	5 ml ± 5%
Barva media	světle zelená
pH	7,0 ± 0,2
Doba použitelnosti	300 dnů
Ochranný obal	20 kusů v ochranné fólii
Balení	40 kusů v balení

Upozornění a omezení

Pouze pro profesionální použití.
Pro jedno použití.
Skladovat při teplotě 2 - 8 °C ve tmě.
Před použitím nechat ustálit na pokojovou teplotu.
Lze očkovat až do data expirace.
Použit okamžitě po otevření primárního obalu.
Nepoužívat, pokud produkt vykazuje známky kontaminace, změny zabarvení, homogenity nebo jiné známky poškození.
Některé kmeny nemusí růst na tomto médiu vzhledem k nutričním požadavkům.
K identifikaci izolovaných kmenů je nutné provést doplňující testy.
Jakákoliv závažná nežádoucí příhoda, ke které došlo v souvislosti s prostředkem, musí být hlášena výrobci a příslušnému orgánu členského státu (www.sukl.cz).

Likvidace

Po použití zařadit pod katalogové číslo odpadu 180103, kategorie N: „Odpady na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce“. Umístit do nádob k tomu určených a následně předat ke konečné termické likvidaci oprávněnou osobou.

Princip

Malachitová zeleň potlačuje růst nespécifické flóry.

Teoretické složení g/l destilované vody

Hydrogenfosforečnan disodný dodekahydrát	1,25
Dihydrogenfosforečnan draselný	0,75
Síran hořečnatý heptahydrát	0,25
Citronan sodný	1,25
L-alanin	0,075
Citronan železitoamonný	0,025
Kaseinový hydrolyzát	2,5
Glycerol	15,0
Malachitová zeleň	0,002
Hovězí sérum	100,0 ml

