














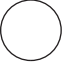






































	H	G	F	E	D	C	B	A	A'
<b>1</b>	<b>URE</b>	<b>MLT</b>	<b>SOR</b>	<b>LAC</b>	<b>FRU</b>	<b>ARA</b>	<b>RAF</b>	<b>bGA</b>	
+									
-									
<b>2</b>	<b>ARG</b>	<b>MAN</b>	<b>TRE</b>	<b>CEL</b>	<b>MNS</b>	<b>RIB</b>	<b>MLZ</b>	<b>GLR</b>	<b>PHS</b>
+									
-									
<b>3</b>	<b>NIT</b>	<b>ESL</b>	<b>MLB</b>	<b>SUC</b>	<b>GAL</b>	<b>XYL</b>	<b>NAG</b>	<b>bGL</b>	<b>HIP</b>
+									
-									

# Pracovní schéma / Working pattern / Pracovní postup / Vázlatos munkamenet

CAT =  
Dôkaz katalázy  
Catalase proof  
Průkaz katalázy  
Kataláz teszt

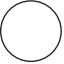

0,85% NaCl



3–3,5 ml



Voliteľne  
Optional  
Volítelnē  
Választható



0,1 ml  
3 McF

	H	G	F	E	D	C	B	A
1	●	○	○	○	○	○	○	○
2	●	○	○	○	○	○	○	○
3	○	○	○	○	○	○	○	○



Parafinový olej / Paraffin oil / Parafinóví olej / Paraffinolaj

35±2°C, 24 h.



H3 NIT reagent



A2 PHS reagent



A3 HIP reagent



Záznam výsledkov do formulára  
Record the results in the form  
Záznam výsledků do formuláře  
Az eredmények feljegyzése az úrlapra



Záznam výsledkov do počítača  
Record the results in the computer  
Záznam výsledků do počítače  
Az eredmények feljegyzése a számítógépbe

**DIAGNOSTICS s. r. o.**, Hodská 68, 924 01 Galanta, Slovenská Republika

tel.: +421-917-742927, +421-917-742931, +421-31-7886415, fax: +421-2-69202902

IČO: 35 871 181, DIČ: 2021281394, IČ DPH: SK2021281394, www.diagnostics.sk, e-mail: info@diagnostics.sk

číslo účtu: 262 070 1536/1100 (Tatra banka), IBAN: SK84 1100 0000 0026 2070 1536, SWIFT: TATRSKBX

