

TruCal Ferritin

Kalibrační set vhodný pro použití při kvantitativním in vitro stanovení feritinu fotometricky.

Katalogové číslo

1 7050 99 10 058

4 x 1 ml

Popis

Set TruCal Ferritin je soubor čtyř kapalných, stabilních kalibrátorů různých hladin, vyrobených na bázi lidského krevního materiálu (séra) a obohacených o aditiva hovězího původu.

Skladování

Otevřené i neotevřené lahvičky musí být skladovány při teplotě 2 – 8°C.

Stabilita

Neotevřené: do data expirace vyznačeného na lahvičce.

Otevřené: aspoň 30 dnů.

Nutno dodržet podmínky správného skladování a manipulace.

Upozornění

1. U všech vzorků krve použitých pro výrobu kalibrátorů TruCal Ferritin byl potvrzen negativní výsledek schválenými metodami pro HBsAg, anti-HIV 1+2 a anti-HCV. Jelikož však není možné jednoznačně vyloučit, že produkty obsahující lidskou krev mohou přenášet infekční agens, je doporučeno zpracovat kalibrátor se stejnou opatrností jako vzorky pacientů.
2. Obsahuje azid sodný (0,95 g/l) jako konzervační prostředek. Nepolykat! Vyhňte se kontaktu s kůží a sliznicemi.

Příprava

TruCal Ferritin je sada kapalných kalibrátorů připravených k přímému použití.

Hodnoty kalibrátoru

Hodnoty TruCal Ferritin kalibrátoru byly stanoveny v návaznosti na Třetí mezinárodní standard (94/572) Světové zdravotnické organizace pro feritin použitím zavedených předpisů.

Literatura

1. Stenman UH. Standardization of immunoassays. In: Price CP, Newman DJ, editors. Principles and practice of immunoassay. New York: Stockton Press; 1997.p.243-68.
2. Dati F. Reference materials and guidelines for standardization of methods in laboratory medicine. In: Thomas L, editor. Clinical laboratory diagnostics. 1st ed. Frankfurt: TH-Books Verlagsgesellschaft; 1998. p. 1393-1401.
3. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories. U.S. Department of Health and Human Services, Washington 1993 (HHS Publication No. [CDC] 93-8395)

Nakládání s odpady

S odpady nakládejte dle požadavků platné legislativy.

Vyrobeno:

DiaSys Diagnostic Systems GmbH
Alte Strasse 9 65558 Holzheim Německo

	Číslo šarže	Datum expirace	Hodnota kalibrátoru
TruCal Ferritin Level 1	14432	2012-08	120 µg/l
TruCal Ferritin Level 2	14433	2012-08	239 µg/l
TruCal Ferritin Level 3	14434	2012-08	617 µg/l
TruCal Ferritin Level 4	14435	2012-08	1140 µg/l

